



CARESCAPE **ONE**

Wszystko w JEDNYM

CARESCAPE™ ONE – *Wszystko w JEDNYM*

rewolucyjne podejście do monitorowania w transporcie

Nadchodzi nowa era w monitorowaniu pacjenta. CARESCAPE ONE pozwala wykorzystać jeden, ustandaryzowany monitor do wewnątrzszpitalnego transportu pacjenta. Niezwykle intuicyjny w użyciu, wykorzystuje inteligentne moduły pomiarowe nowej generacji, zapewnia niespotykaną elastyczność i ciągłość danych pomiędzy różnymi obszarami opieki nad pacjentem. Umożliwia optymalizację całkowitego kosztu posiadania spełniając dzisiejsze wymogi kliniczne i pozostając otwartym na technologie przyszłości.

Pacjenci są często transportowani w celu przeprowadzenia badań diagnostycznych i procedur terapeutycznych. Jednak każdy transport wiąże się z potencjalnym ryzykiem ¹⁾. Transportowani pacjenci wymagają takiego samego stopnia monitorowania jak wtedy, gdy pozostają na swoim łóżku. Tymczasem pacjenci są coraz bardziej chorzy, zasoby szpitalne ograniczone ²⁾, a przeciążony personel kliniczny ma coraz więcej pracy.

Wyobraź sobie JEDEN ustandaryzowany monitor, który czyni transport pacjenta tak łatwym jak powiedzenie „odłącz i jedź”. JEDEN monitor, zapewniający duży ekran do obrazowania stanu pacjenta, nieprzerwanie monitorujący parametry życiowe pacjenta i błyskawicznie dostosowujący się do potrzeb Twojego oddziału. JEDEN monitor, który ogranicza liczbę potrzebnych na oddziale urządzeń, minimalizuje koszty kapitału i obsługi serwisowej zapewniając jednocześnie ochronę inwestycji.

To CARESCAPE ONE
Czyni każde łóżko – transportowym.

¹⁾ Adverse events during intrahospital transport of critically ill patients: incidence and risk factors, Parmentier-Decrucq et al. Annals of Intensive Care 2013, 3:10"

²⁾ Mieux vivre la réanimation, SRLF <http://reamartigues.hautetfort.com/media/00/01/1660645503.pdf>.



CARESCAPE ONE - optymalizacja procesów pracy

JEDEN optymalny proces

CARESCAPE ONE dostosowuje się do zmieniających potrzeb oddziału poprzez podłączenie modułu pomiarowego zwanego Parametrem.

Optymalizacja transportu pacjenta pozwala skupić się na potrzebach pacjenta, zamiast na obsłudze monitora. Wystarczy odłączyć **CARESCAPE ONE** ze stacji dokującej przy głównym monitorze. Na stanowisku docelowym podłączamy go do stacji dokującej, a system automatycznie zapewni kontynuację alarmowania oraz ciągłość danych w monitorze i wysyłanych do systemu elektronicznej dokumentacji medycznej.

Zmiana parametrów monitorowanych na różnych oddziałach polega wyłącznie na podłączaniu i odłączaniu modułów pomiarowych **CARESCAPE PARAMETERS**.

JEDEN skuteczny transport


Niezwykłe lekki i intuicyjny w użyciu, CARESCAPE ONE czyni każdy monitor pacjenta gotowym do transportu, bez konieczności wykorzystywania dodatkowych urządzeń i komponentów.

CARESCAPE ONE sprawia, że transport pacjenta staje się niezwykle łatwym. Ultralekki monitor z dużym ekranem w prosty sposób mocowany jest do ramy łóżka. Dodatkowe parametry podłączane są za pośrednictwem zminiaturyzowanych, cyfrowych modułów pomiarowych **CARESCAPE PARAMETERS**. Najwyższej klasy algorytmy pomiarowe GE zapewniają precyzję, dokładność i szczegółowość.







ECG - 3-, 5-, 6-, 10-leadset

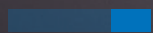

SpO₂ - GE TruSignal™, Masimo, Nellcor

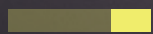

CO₂ - Respiration LoFlo™

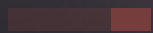

Temp - Dual Channel



Pressure - Dual Channel

CARESCAPE ONE - inteligentny i elastyczny

JEDNA śmiała koncepcja

Inteligentna i zminiaturyzowana technologia monitora zapewnia łatwą integrację dzisiejszych i przyszłych rozwiązań klinicznych.

CARESCAPE ONE spełnia wszelkie dzisiejsze wymagania monitorowania wewnątrzszpitalnego i jest gotowy na to, co przyniesie przyszłość. Innowacyjny projekt i otwarta architektura dają przestrzeń na rozwój technologii. **CARESCAPE ONE** umożliwia podłączenie dużej liczby **CARESCAPE PARAMETERS** za pośrednictwem standardowych, medycznych portów USB. Pomiar nowych parametrów wymaga jedynie podłączenia dodatkowych, zminiaturyzowanych modułów pomiarowych.

JEDEN elastyczny system

Inteligentny, medyczny interfejs USB umożliwia dynamiczne rozpoznawanie parametrów, aby wspomagać dostosowanie monitora do stanu pacjenta i wymagań oddziału.

CARESCAPE ONE pozwala łatwo i szybko wybrać zestaw niezbędnych parametrów życiowych. Ośiem identycznych, medycznych portów USB ułatwia podłączenie modułów pomiarowych. Wystarczy podłączyć dowolny **CARESCAPE PARAMETER** do dowolnego portu USB, a monitor automatycznie rozpozna parametr życiowy i rozpocznie jego monitorowanie.





CARESCAPE ONE - ochrona inwestycji i prostota serwisowania

JEDNO ustandaryzowane rozwiązanie

Prawdziwa standaryzacja oparta o jeden monitor usprawnia zarządzanie zasobami i optymalizuje całkowity koszt posiadania.

Jeden monitor transportowy dostosowuje się do potrzeb pacjentów na różnych oddziałach. Wystarczy zakupić, obsługiwać i serwisować jeden rodzaj monitora – bez konieczności różnicowania wersji urządzenia i oprogramowania, które zwiększają koszty i komplikują obsługę serwisową oraz procesy pracy. Pełna kompatybilność z kardiomonitorami CARESCAPE™ oraz centralą CARESCAPE™ Central Station zapewnia ochronę inwestycji, a łatwa modernizacja ogranicza koszt kapitału.

JEDNO wytrzymałe urządzenie

System został wykonany z bardzo wytrzymałych materiałów, aby sprostać najbardziej wymagającym środowiskom klinicznym.

Ustandaryzowana platforma i medyczne złącze USB sprawiają, że system jest prosty w utrzymaniu. Większość części można łatwo serwisować na miejscu, bez specjalistycznej wiedzy technicznej. Wszystkie komponenty są odporne na złamania, nacięcia, ścieranie, uderzenia, wnikanie płynów – aby podołać najtrudniejszym warunkom panującym w szpitalu.

Bezpieczny i serwisowalny

Każdy monitor transportowy CARESCAPE ONE oraz monitor główny rodziny CARESCAPE posiada dwuletni okres między przeglądami, co obniża koszty serwisowania.

Elastyczne kontrakty gwarancyjne i serwisowe mogą być dostosowane do potrzeb każdego klienta. Wysokiej klasy szyfrowanie danych i rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa cybernetycznego zapewniają bezpieczeństwo danych pacjenta.

Interfejs CSI (CARESCAPE Service Interface) umożliwia zdalne zarządzanie i rozwiązywanie problemów związanych z urządzeniami, oszczędzając czas i zasoby.





CARESCAPE ONE

Część ekosystemu opieki nad pacjentem

Monitor CARESCAPE ONE odgrywa istotną rolę w systemie opieki nad pacjentem. Daje dostęp do szerokiego zasobu uznanych rozwiązań klinicznych GE oraz innowacji w urządzeniach medycznych i algorytmach klinicznych. W sposób płynny integruje się z ekosystemem we wszystkich obszarach opieki, poprawiając wydajność personelu i usprawniając procesy podejmowania decyzji klinicznych.

CARESCAPE ONE – dziedzictwo systemu CARESCAPE




CARESCAPE B850
Monitor przyłóżkowy



CARESCAPE ONE
Monitor transportowy

CARESCAPE PARAMETER
Moduły pomiarowe

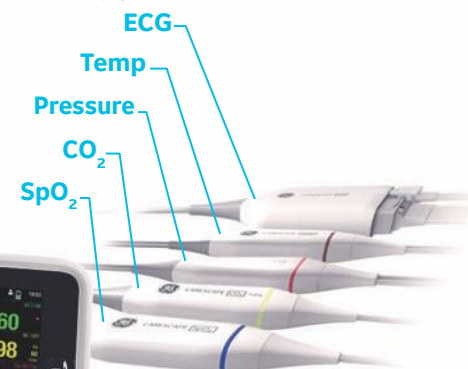

System monitorowania GE zbudowany został w oparciu o uznane technologie kliniczne i wieloletnie doświadczenie w zakresie monitorowania parametrów życiowych, zarówno własne jak i naszych partnerów.

CARESCAPE ONE osiąga swój potencjał w połączeniu z monitorami przyłóżkowymi rodziny CARESCAPE i innymi produktami GE.

Skorzystaj z przeszło 40 lat doświadczenia w monitorowaniu pacjentów.



Imagination at work

Produkt może nie być dostępny we wszystkich krajach i regionach. Pełna specyfikacja techniczna jest dostępna na żądanie. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy skontaktować się z przedstawicielem GE Healthcare.
www.gehealthcare.com/promotional-locations.

Dane mogą ulec zmianie.
© 2018 General Electric Company.

GE, monogram GE, Imagination at work, CARESCAPE i TruSignal są znakami handlowymi General Electric Company.

Respironics i LoFlo są zarejestrowanymi znakami handlowymi Koninklijke Philips Electronics N.V. Nellcor i OxiMax są znakami handlowymi Medtronic Company. Wszystkie pozostałe znaki handlowe należą do odpowiadających im właścicieli.

Kopiowanie i reprodukcja w jakiejkolwiek formie bez wcześniejszej zgody GE jest zabronione. Żadne informacje zawarte w tym dokumencie nie powinny być wykorzystane do diagnozowania lub leczenia jakiejkolwiek choroby lub stanu pacjenta. Czytelnik musi skonsultować się z profesjonalistą w zakresie służby zdrowia.

CARESCAPE ONE nie jest dostępny w sprzedaży w USA i nie został dopuszczony przez FDA.

JB52547XX(1)a